


# Tratamiento con CytoSorb

Ayuda para la toma de  
decisiones en pacientes  
sometidos a ECMO/ECLS

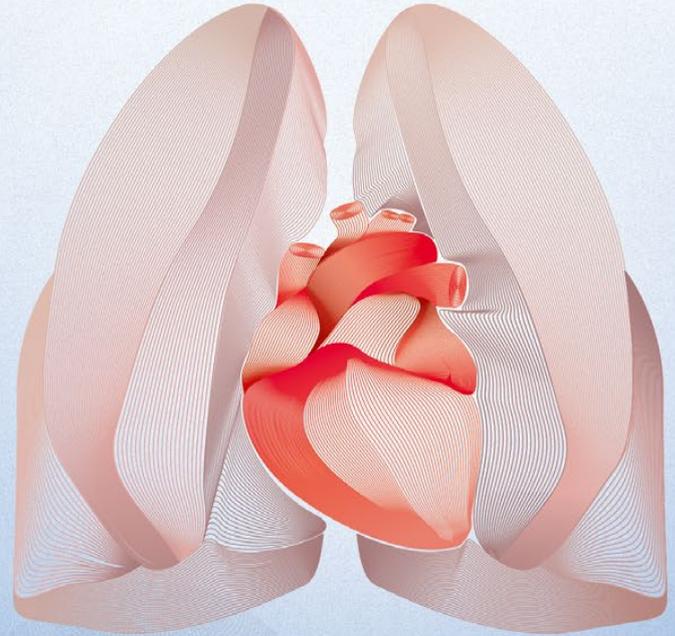

## Inicio de Tratamiento con CytoSorb



Idealmente, el período de observación antes de tomar en consideración CytoSorb como medida terapéutica adyuvante no debe exceder las 6 horas

## Continuación de Tratamiento con CytoSorb



Un tratamiento causal adecuado, así como las condiciones técnicas generales del tratamiento ECMO (posición del catéter, flujo, etc.) son las bases para el éxito terapéutico

# Condiciones clínicas en las que el tratamiento con CytoSorb puede ser beneficioso en pacientes con ECMO/ECLS:

Las siguientes situaciones clínicas se caracterizan por una reacción inflamatoria, o bien empeoran a causa de ella y, por lo tanto, además pueden conducir a un estado de choque.

Por ello, además del tratamiento estándar y del tratamiento de la causa subyacente, se puede tomar en consideración el tratamiento con CytoSorb.

- Choque cardiogénico
- ECPR
- Puente para tratamiento VAD
- ARDS con elevada necesidad de vasopresores
- Síndrome de postcardiotomía
- Endocarditis infecciosa
- Choque séptico
- *Falla hepática (eliminación de bilirrubina)*
- *Rabdomiólisis (eliminación de mioglobina)*

Esta guía de decisión tiene carácter no vinculante y no puede reemplazar la decisión terapéutica individual del médico a cargo. El médico a cargo es el responsable de determinar y ejecutar medidas de diagnóstico y tratamiento para cada paciente individualmente. Los datos y resultados clínicos y preclínicos adquiridos con la columna de adsorción CytoSorb no son transferibles a otros productos. CytoSorb sólo debe ser utilizado por personal debidamente formado en el uso de tratamientos extracorpóreos. CytoSorb no está disponible comercialmente en Estados Unidos. CytoSorb y CytoSorbents son marcas de CytoSorbents Corporation, EE. UU. © Copyright 2021, CytoSorbents Europe GmbH. Reservados todos los derechos. BT1088R03SPA2021

Visite [cyto.zone/literature](https://cyto.zone/literature)

Síganos en     | [www.cytosorb.com](https://www.cytosorb.com)

**CytoSorbents Europe GmbH**

Müggelseedamm 131  
12587 Berlín | Alemania

T +49 30 65 49 91 45

F +49 30 65 49 91 46

[support@cytosorbents.com](mailto:support@cytosorbents.com)